



۱- کابل برق دستگاه را از یک طرف به پشت دستگاه و از طرف دیگر به پریز برق (۲۲۰ ولت شهری) متصل نمائید.

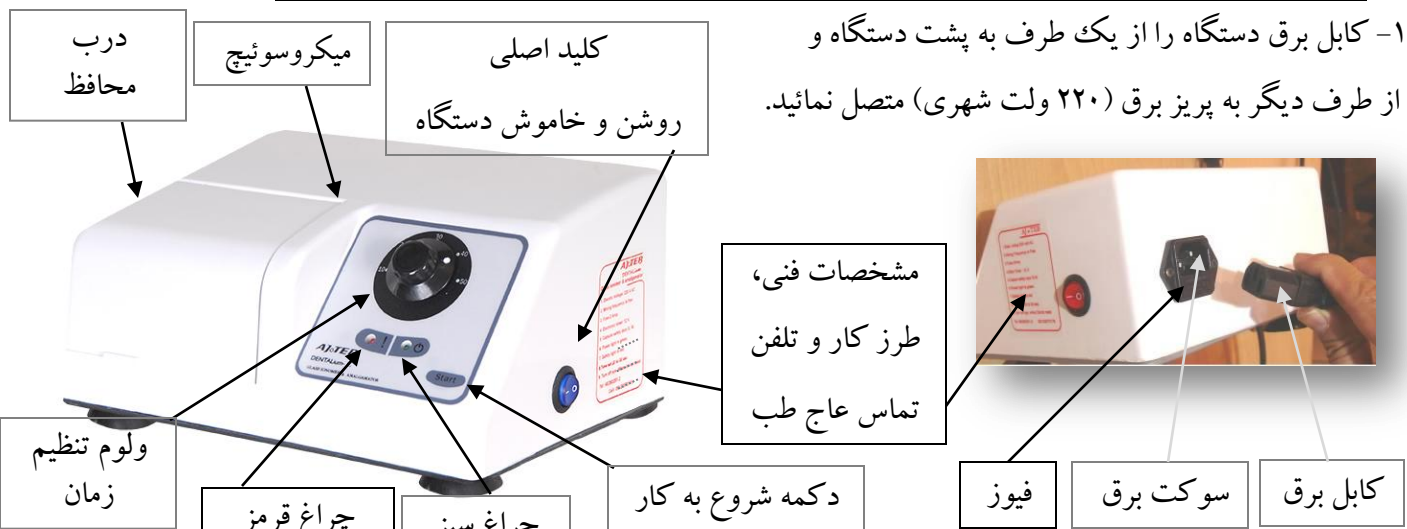

ملاحظات:

- دستگاه را در کنار سایر دستگاههای برقی قرار ندهید.
- سطح زیر دستگاه کاملاً صاف باشد.

(الف) کلید اصلی دستگاه را روشن نمائید.

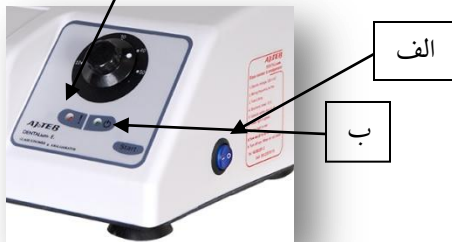

(ب) حالت چراغ سبز آماده بکار دستگاه روشن می شود.

ج- درپوش محافظ را باز کرده و کپسول را بین گیره قرار دهید.

توجه: فاصله بین دو طرف گیره با دست قابل تنظیم می باشد.



د- زمان مورد نیاز برای کار دستگاه را با پیچاندن ولوم تنظیم زمان انتخاب نمائید.

توجه: پودر و جیوه های ساخت کارخانجات مختلف نیاز به زمانهای متفاوت برای مخلوط شدن دارند.



ه- درپوش محافظ را بسته و کلید شروع بکار دستگاه (Start) را فشار دهید.

توجه: در صورت باز بودن درب محافظ، دستگاه کار نمی کند.

طریقه باز نمودن کشویی فیوز برای بازمینی یا تعویض



- جدول رفع نقص احتمالی دستگاه:

مشکل بوجود آمده	شیوه برطرف نمودن عیب
چراغ سبز آماده بکار و چراغ آخطار روشن، ولی دستگاه شروع بکار نمیکند	درب محافظ، کاملاً بسته نشده است
کلید اصلی روشن، چراغ سبز آماده بکار خاموش است	• اتصال برق به پشت دستگاه و پریز و دوشاخه را کنترل کنید. • اگر برطرف نشد فیوز پشت دستگاه را کنترل نمائید
چراغ قرمز کلید اصلی و سبز آماده به کار روشن نمی شود	خرابی کابل برق یا فیوز ۲ آمپر پشت دستگاه سوخته است

در صورتیکه نقص دستگاه برطرف نشد با خدمات پس از فروش عاج طب تماس حاصل فرمائید. ۶۰-۶۶۸۵۹۲۴۵-۰۲۱