
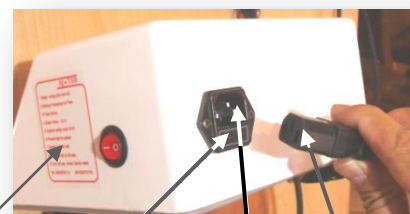


۱- کابل برق دستگاه را از یک طرف به پشت دستگاه و از طرف دیگر به پریز برق (۲۲۰ ولت شهری) متصل نمائید.

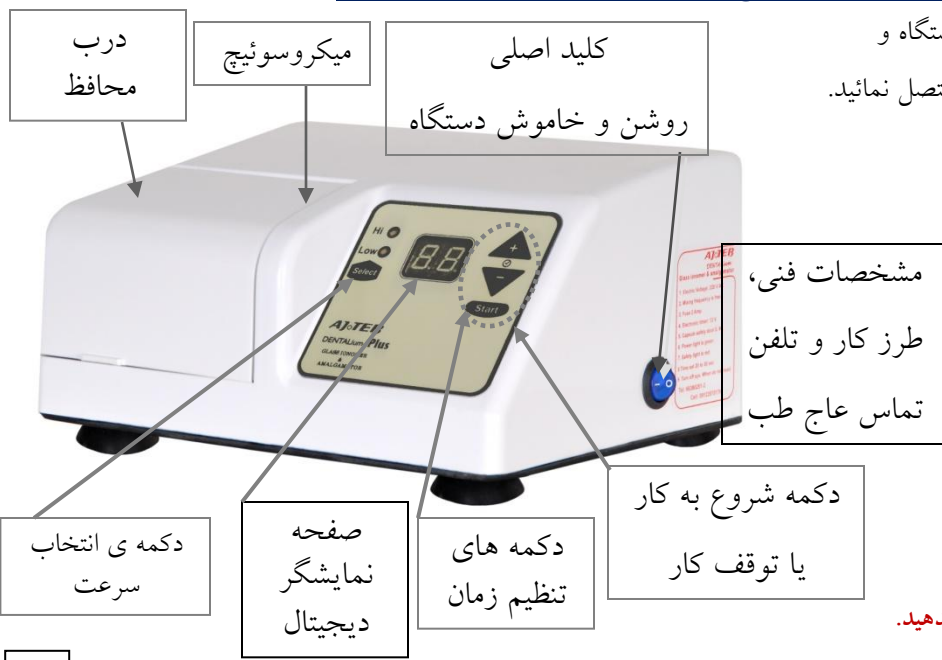

### ملاحظات:

- دستگاه را در کنار سایر دستگاههای برقی قرار ندهید.
- سطح زیر دستگاه کاملاً صاف و تراز باشد.

الف- کلید اصلی دستگاه را روشن نمائید.



ب- صفحه نمایش زمان از قبل تنظیم شده را نمایش میدهد.

ج- سرعت مورد نیاز را انتخاب نمایید.

د- درپوش محافظ را باز کرده و کپسول را بین گیره قرار دهید.

توجه: فاصله بین دو طرف گیره با دست قابل تنظیم می باشد.



ه- زمان مورد نیاز برای کار دستگاه را با دکمه بالایی و پایینی تنظیم نمائید.

توجه: پودر و جیوه های ساخت کارخانجات مختلف به زمانهای متفاوت برای مخلوط شدن نیاز دارند.

- زمانی که تنظیم مینمایید بعد از اولین استارت در حافظه دستگاه ذخیره و بعد از هر بار روشن شدن دستگاه تا وقتی که آنرا تغییر ندهید ثابت باقی خواهد ماند.


ه- توجه: درپوش محافظ را بسته و سرعت مورد نظر را انتخاب و سپس کلید شروع بکار دستگاه (Start)

را فشار دهید.

در صورت باز بودن درب محافظ، دستگاه کار نکرده و صفحه دیجیتال روشن و خاموش میشود.

و- در صورت نیاز به توقف کار دستگاه یکبار دیگر کلید شروع بکار را فشار دهید.

طریقه باز نمودن کشویی فیوز برای بازبینی یا تعویض (داخل کشویی یک فیوز یدک نیز موجود می باشد)

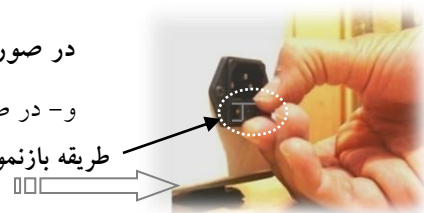

### جدول رفع نقص احتمالی دستگاه:

مشکل بوجود آمده	شیوه برطرف نمودن عیب
صفحه دیجیتال روشن، ولی دستگاه شروع بکار نمیکند	درب محافظ، کاملاً بسته نشده است
کلید اصلی روشن، صفحه دیجیتال خاموش است	• اتصال برق به پشت دستگاه و پریز و دوشاخه را کنترل کنید. • اگر برطرف نشد فیوز پشت دستگاه را کنترل نمائید
چراغ قرمز کلید اصلی و صفحه دیجیتال روشن نمی شود	خرابی کابل برق یا فیوز ۲ آمپر پشت دستگاه سوخته است

✓ در صورتیکه نقص دستگاه برطرف نشد با خدمات پس از فروش عاج طب تماس حاصل فرمائید: ۰۶۰-۶۶۸۵۹۷۴۵-۰۲۱

## هشدار:

- ۱- این دستگاه برای استفاده افراد با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، کودکان یا افراد بی تجربه و نا آگاه نمی باشد مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت و مطابق با دستورالعمل، استفاده از وسیله انجام شود.
  - ۲- لطفا قبل از راه اندازی و بهره وری از دستگاه، طرزکار را به دقت مطالعه فرمائید.
  - ۳- برای جلوگیری از شوک الکتریکی، هرگز با دست مرطوب سوکت دستگاه را وارد پریز برق نکنید.
  - ۴- دستگاه نباید در معرض میدانهای مغناطیسی شدید یا در مجاورت دستگاه های MRI و الکترو شوک و الکتروسرجری قرار گیرد. توصیه میشود حداقل در فاصله یک متری این دستگاهها قرار داده شود.
  - ۵- در صورت صدمه دیدن کابل تغذیه باید با کابل مخصوص یا مجموعه ای که توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز آن تحویل میشود جایگزین شود و هرگز از کابل های فرسوده که فاقد کیفیت مطلوب میباشد استفاده نشود. در نصب و راه اندازی دستگاه توسط افراد غیر متخصص استفاده نکنید که باعث ایجاد نقص و خسارت بیشتر به دستگاه میشود.
  - ۶- دستگاه نباید در مجاورت گازهای بیهوشی و یا اشتعال زا و غنی از اکسیژن بیشتر از ۲۱ درصد است استفاده شود.
  - ۷- هنگام تعویض فیوز حتما باید از فیوزهای با ظرفیت شکست بالا استفاده شود.
  - ۸- حتما باید از کپسول های استاندارد استفاده شود و کپسول را بصورت صحیح بین دو قاشق نگهدارنده کپسول قرارداد بطوریکه امکان لق خوردن آن به حد اقل برسد. دستگاه باید توسط کاربران آموزش دیده مورد استفاده قرار گیرد.
  - ۹- قبل از هر بار استفاده بررسی عملکرد صحیح دستگاه توسط کاربر الزامی است کاربر باید بطور کامل مطلع به کار با دستگاه باشد.
  - ۱۰- دستگاه حتما باید در شرایط محیطی نصب و راه اندازی و انبارش و حمل و نقل یابد.
  - ۱۱- از ریزش مایعات روی دستگاه و قرارداد در معرض دما و رطوبت جداً خودداری نمایید.
- طول عمر مفید این دستگاه از طرف استاندارد تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هفت سال تعیین شده است.

مراکز سرویس و خدمات پس از فروش محصولات عاج طب:

تهران - ضلع شرقی بزرگراه نواب صفوی - جنب پل مرتضوی - مرکز تجارت مواد و تجهیزات دندانپزشکی ایران - پلاک ۵۶ - عاج طب

۶۶۶۰۷۵۷۵ - ۶۶۸۵۹۷۶۰ - ۱۶۶۳۸۰۲۵۱ - ۰۹۱۲۵۹۷۱۸۵۷ - فکس ۶۶۸۵۹۷۴۵ - (۰۹۱۲۳۵۷۰۱۷۶)

www.ajteb.ir Email: info@ajteb.ir

شرایط نگهداری دستگاه در حالت کار و انبار

فاکتورها	شرایط محیطی	شرایط انبار و حمل و نقل
رطوبت (درصد)	۷۰-۱۰	۹۵-۱۰
دما (درجه سانتیگراد)	۵۰-۵	۸۰-۵
فشار (hpa)	۱۰۶۰-۸۶۰	۱۰۶۰-۸۶۰